



kagayaki

О КОМПАНИИ

Компания **Kagayaki** — ведущий российский производитель стоматологических полиров, соответствующих международным стандартам качества. Мы гордимся тем, что являемся единственной компанией в России, которая выпускает стоматологические полиры на уретановой основе, обеспечивая их высочайшее качество и надежность. Наши успехи базируются на постоянном развитии и совершенствовании продукции.

Kagayaki стремится превзойти ожидания клиентов и предоставляет наилучшие решения для стоматологических практик. Мы не просто удовлетворяем потребности наших покупателей; мы помогаем им достичь новых вершин в своей профессиональной деятельности.

Наши ключевые особенности:

1. Инновационные продукты:

Разработка новых продуктов и технологий, основанных на современных научных исследованиях, что позволяет стоматологам оставаться впереди в своей отрасли.

2. Качество и надежность:

Наши продукты отличаются высоким качеством и надежностью, что позволяет стоматологам быть уверенными в результате своей работы.

3. Партнерство и поддержка:

Мы не просто продаём продукты, но также предоставляем консультации и комплексную поддержку стоматологам, помогая им расширять свои профессиональные навыки и улучшать свою практику.

4. Пациентоориентированность:

Мы всегда ориентированы на потребности пациентов, стремимся помочь стоматологам предоставлять лучшее качество лечения и создавать комфортные условия для пациентов.

СОДЕРЖАНИЕ

Enforce Pin	4
Enforce Pin mini	5
Ensmart Pin	6
Ensmart Pin	7
Diamond Sun	8
Diamond Moon	9
StarFlex	11
StarFlex mini	11
StarFlex Septum	11
RoundFlex M	12
RoundFlex T.....	13
RoundFlex	14
Штрипсы (287, 689, 281, 683)	15
Kurin One.....	16
Kurin Two	16
Комплект: Kurin One, Kurin Two, Bowl	17

Mira Zr	18
Mira	18
Wave	19
Henka	19
Daiyamondo	20
Disuku F	20
Комплект Дениса Крутикова	21
Flat	22
Flat Hard	22
Sharp	23
Sharp 2	23
Беззольные штифты	24
Счетчики использования инструментов	24
Katakana	25
Disuku Z	25
Контакты	26

Kagayaki Enforce Pin

ПОЛИРЫ НА УРЕТАНОВОМ СВЯЗУЮЩЕМ

Предназначены для контурирования, шлифовки и финишной обработки поверхностей композитных, компомерных и стеклоиономерных реставраций.

Материал пина - полимер белого цвета.

УДОБНАЯ ТРЕХШАГОВАЯ ПОЛИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

Шаг 1 Белый полир для удаления излишков и обработки контура

Шаг 2 Розовый полир для выравнивания шероховатостей и придания гладкости

Шаг 3 Желтый полир для придания ультраблеска

3 ФОРМЫ



3 ВИДА АБРАЗИВНОСТИ

125 / 70 / 32

**МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ ВОДЫ!
НЕ НАГРЕВАЮТ ПОЛИРУЕМУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ!**

*Входят в Комплект для финишной полировки
Дениса Крутикова от Kagayaki

В упаковке 40 шт.



○ 3000-5000 RPM	Удаление излишков и обработка контура	Выравнивание шероховатостей и придание блеска	Придание ультра блеска
Абразивность	Грубая (125 μ)	Средняя (70 μ)	Мелкая (32 μ)
Цвет	Белый	Розовый	Жёлтый
Артикул №	EP125-1 EP125-2 EP125-3	EP70-1 EP70-2 EP70-3	EP32-1 EP32-2 EP32-3

Kagayaki Enforce Pin mini

ПОЛИРЫ НА УРЕТАНОВОМ СВЯЗУЮЩЕМ

Мини версия линейки **Enforce Pin**. Предназначены для контурирования, поверхностей композитных, компомерных и стеклоиономерных реставраций. **Материал пина - полимер белого цвета.**

3 ФОРМЫ



1 ВИД АБРАЗИВНОСТИ

125

**МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ ВОДЫ!
НЕ НАГРЕВАЮТ ПОЛИРУЕМУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ!**

В упаковке 30 шт.

NEW

Меньший размер полиров позволяет достичь превосходного результата в труднодоступных участках



○ 3000-5000 RPM

Удаление излишков и обработка контура

Абразивность

Грубая (125 μ)

Цвет

Белый

Артикул №

ERM125-1

ERM125-2

ERM125-3

Kagayaki Ensmart Pin

ПОЛИРЫ НА СИЛИКОНОВОМ СВЯЗУЮЩЕМ

Предназначены для контурирования, шлифовки и финишной обработки поверхностей композитных материалов.

Материал пина - полимер синего цвета.

УДОБНАЯ ТРЕХШАГОВАЯ ПОЛИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

Шаг 1 Белый полир для удаления излишков и обработки контура

Шаг 2 Зеленый полир для выравнивания шероховатостей и придания гладкости

Шаг 3 Розовый полир для придания ультраблеска

3 ФОРМЫ



3 ВИДА АБРАЗИВНОСТИ

125 / 70 / 32

ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ КОНТАКТЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОЛИРЫ НАГРЕВАЮТСЯ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ НА РЕКОМЕНДУЕМЫХ ОБОРОТАХ ЛЕГКИМИ ПЕРЕРЫВИСТЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ

В упаковке 30 шт.



○ 3000-5000 RPM	Удаление излишков и обработка контура	Выравнивание шероховатостей и придание блеска	Придание ультра блеска
Абразивность	Грубая (125 μ)	Средняя (70 μ)	Мелкая (32 μ)
Цвет	Белый	Зеленый	Розовый
Артикул №	ENP125-1 ENP125-2 ENP125-3	ENP70-1 ENP70-2 ENP70-3	ENP32-1 ENP32-2 ENP32-3

Kagayaki Ensmart Pin

ПОЛИРЫ НА СИЛИКОНОВОМ СВЯЗУЮЩЕМ

Предназначены для контурирования, шлифовки и финишной обработки поверхностей композитных материалов.

Материал пина - нержавеющая сталь.

УДОБНАЯ ТРЕХШАГОВАЯ ПОЛИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

Шаг 1 Белый полир для удаления излишков и обработки контура

Шаг 2 Зеленый полир для выравнивания шероховатостей и придания гладкости

Шаг 3 Розовый полир для придания ультраблеска

3 ФОРМЫ



3 ВИДА АБРАЗИВНОСТИ

125 / 70 / 32

ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ КОНТАКТЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОЛИРЫ НАГРЕВАЮТСЯ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ НА РЕКОМЕНДУЕМЫХ ОБОРОТАХ ЛЕГКИМИ ПЕРЕРЫВИСТЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ

В упаковке 30 шт.



○ 3000-5000 RPM	Удаление излишков и обработка контура	Выравнивание шероховатостей и придание блеска	Придание ультра блеска
Абразивность	Грубая (125 μ)	Средняя (70 μ)	Мелкая (32 μ)
Цвет	Белый	Зеленый	Розовый
Артикул №	ENPS125-1 ENPS125-2 ENPS125-3	ENPS70-1 ENPS70-2 ENPS70-3	ENPS32-1 ENPS32-2 ENPS32-3

Kagayaki Diamond Sun

ПОЛИРЫ НА УРЕТАНОВОМ СВЯЗУЮЩЕМ,
НАПОЛНЕННЫЕ МИКРОТОНКИМИ АЛМАЗАМИ

Предназначены для финишной обработки поверхностей реставраций с предварительно сформированными контурами.
Материал пина - полимер серого цвета.

УДОБНАЯ ДВУХШАГОВАЯ ПОЛИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

Шаг 1 Бежевый полир для получения гладкой поверхности реставрации и имитации блеска собственных тканей зуба

Шаг 2 Желтый полир для финишной обработки и получения абсолютно гладкой поверхности реставрации, повышающей эстетические свойства пломбы

3 ФОРМЫ



2 ВИДА АБРАЗИВНОСТИ

30 / 10

ЭТИМИ ПОЛИРАМИ МОЖНО
ПОДПОЛИРОВАТЬ МЕТАЛЛОКЕРАМИКУ

В упаковке 30 шт.



○ 3000-5000 RPM	Получение гладкой поверхности реставрации			Финишная обработка для получения абсолютно гладкой поверхности реставрации, повышающая эстетические свойства пломбы		
Абразивность	Мелкая (30 μ)			Экстремелкая (10 μ)		
Цвет	Бежевый			Желтый		
Артикул №	DS 30-1	DS 30-2	DS 30-3	DS 10-1	DS 10-2	DS 10-3

Kagayaki Diamond Moon

ПОЛИРЫ НА СИЛИКОНОВОМ СВЯЗУЮЩЕМ,
НАПОЛНЕННЫЕ АЛМАЗНЫМ АБРАЗИВОМ

Предназначены для финишной обработки поверхности реставрации с предварительно сформированными контурами. Полиры применяются для сглаживания шероховатостей и придания зеркального блеска поверхности реставрации.

Материал пина — нержавеющая сталь.

УДОБНАЯ ДВУХШАГОВАЯ ПОЛИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

Шаг 1 Серый полир для получения гладкой поверхности реставрации и имитации блеска собственных тканей зуба

Шаг 2 Бежевый полир для финишной обработки и получения абсолютно гладкой поверхности реставрации, повышающей эстетические свойства пломбы

3 ФОРМЫ



2 ВИДА АБРАЗИВНОСТИ

10-30 / 3-10

В упаковке 6 шт.

Артикул №9056 (ассортимент)



6000-12000 RPM	Получение гладкой поверхности реставрации	Финишная обработка для получения абсолютно гладкой поверхности реставрации, повышающая эстетические свойства пломбы				
Абразивность	Мелкая (10-30 μ)	Экстремелкая (3-10 μ)				
Цвет	Серый	Бежевый				
Артикул №	DMS 30-1	DMS 30-2	DMS 30-3	DMS 10-1	DMS 10-2	DMS 10-3



StarFlex



StarFlex



mini



Septum

Kagayaki StarFlex / StarFlex mini / StarFlex Septum

ДВУХШАГОВАЯ ПОЛИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ ПРОЧНОГО СИЛИКОНА С АЛМАЗНЫМИ ЧАСТИЦАМИ



УДОБНАЯ ДВУХШАГОВАЯ ПОЛИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

Шаг 1 Синий полир для устранения дефектов смоделированной структуры поверхности реставрации и получения гладкой поверхности и имитации блеска собственных тканей зуба

Шаг 2 Голубой полир для получения абсолютно гладкой зеркальной поверхности реставрации, повышающей эстетические свойства пломбы

Обладает особой износостойкостью и устойчивостью к истиранию, что позволяет достичь превосходного результата полировки за меньшее время и с меньшим усилием нажима. Уникальность формы диска с гибкими спиральями позволяет точно повторить ранее созданный рельеф и структуру, а также придать бриллиантовый блеск композитной реставрации.

Материал пина — нержавеющая сталь.

StarFlex Mini


Меньший диаметр для более удобной работы в труднодоступных местах.

StarFlex Septum

Изменённая версия двухшаговой полировочной системы «StarFlex». Увеличенная жёсткость и износостойкость достигаются благодаря добавлению перегородки между спиральями полира.

StarFlex: артикул №5110S (ассортимент)
StarFlex mini: артикул №5115S (ассортимент)
StarFlex Septum: артикул №5116S (ассортимент)

В упаковке 6 шт.

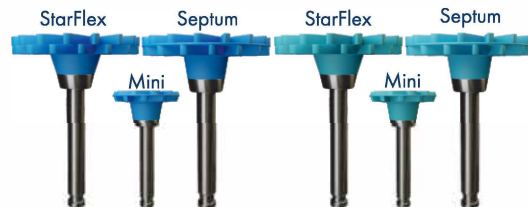

Цвет	ШАГ 1: Синий - предполировка	ШАГ 2: Голубой - ультраблеск
Зернистость	Грубая (36-54 μ)	Мягкая (4-8 μ)
RPM	8000-10000	6000-12000
Артикул №	5114CS 5113CS 5118CS	5112FS 5111FS 5117FS


Kagayaki RoundFlex M

Система дисков повышенной жесткости с металлической втулкой

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ДИСКОВ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ,
ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПРИДАТЬ РЕСТАВРАЦИИ ЗЕРКАЛЬНЫЙ
БЛЕСК



Для дисков RoundFlex T | RoundFlex M подходит уникальная система крепления Kagayaki. Дискoderжатель подходит для фиксации дисков с металлической втулкой, а после фиксации головка дискoderжателя возвышается над втулкой диска, что обеспечивает удобство и эффективность работы. Цанговая фиксация диска - используется для обеспечения надежного крепления диска на оси и в устройстве.

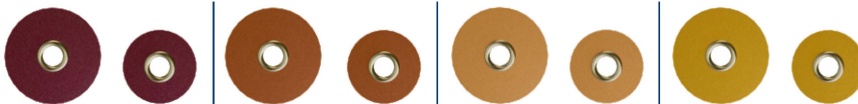

20000 RPM	Контурирование		Шлифование		Полирование		Глянцевание	
Абразивность	Грубый		Средний		Мягкий		Супермягкий	
Диаметр	12,7 мм	9,5 мм	12,7 мм	9,5 мм	12,7 мм	9,5 мм	12,7 мм	9,5 мм
Арт. № 50 шт.	2218С/50	2217С/50	2216М/50	2215М/50	2214F/50	2213F/50	2212SF/50	2211SF/50



ФОРМЫ ВЫПУСКА:

- 50 шт. (без дискoderжателей)
* № арт. в таблице

- 240 шт. (по 30 шт. все виды дисков,
2 дискoderжателя)



Арт. № 9202 — 1 коробка — по 30 шт. все виды дисков, 2 дискoderжателя

Арт. № 0021S — 1 пакет — 1 дискoderжатель


Kagayaki RoundFlex T

Система дисков средней жесткости с металлической втулкой

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ДИСКОВ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ,
ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПРИДАТЬ РЕСТАВРАЦИИ ЗЕРКАЛЬНЫЙ
БЛЕСК



Для дисков RoundFlex T | RoundFlex M подходит уникальная система крепления Kagayaki. Дискoderжатель подходит для фиксации дисков с металлической втулкой, а после фиксации головка дискoderжателя возвышается над втулкой диска, что обеспечивает удобство и эффективность работы. Цанговая фиксация диска - используется для обеспечения надежного крепления диска на оси и в устройстве.

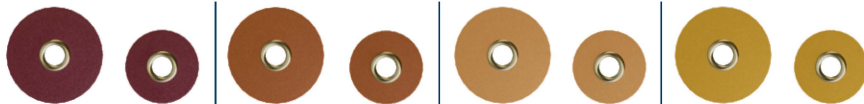

20000 RPM	Контурирование		Шлифование		Полирование		Глянцевание	
Абразивность	Грубый		Средний		Мягкий		Супермягкий	
Диаметр	12,7 мм	9,5 мм	12,7 мм	9,5 мм	12,7 мм	9,5 мм	12,7 мм	9,5 мм
Арт. № 50 шт.	2158С/50	2157С/50	2156М/50	2155М/50	2154F/50	2153F/50	2152SF/50	2151SF/50



ФОРМЫ ВЫПУСКА:

- 50 шт. (без дискoderжателей)
* № арт. в таблице

- 240 шт. (по 30 шт. все виды дисков,
2 дискoderжателя)



Арт. № 9203 — 1 коробка — по 30 шт. все виды дисков, 2 дискoderжателя

Арт. № 0021S — 1 пакет — 1 дискoderжатель

Kagayaki RoundFlex

Система гибких дисков с пластиковой втулкой и уникальной системой крепления


ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ДИСКОВ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ,
ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПРИДАТЬ РЕСТАВРАЦИИ ЗЕРКАЛЬНЫЙ
БЛЕСК



Для дисков RoundFlex предназначена уникальная система крепления Kagayaki, которая обеспечивает удобство в работе. Особенностью этого дискодержателя является головка, расположенная ниже поверхности диска, что позволяет защитить поверхность реставрации от царапин. Кроме того, укороченный дискодержатель обеспечивает доступ к труднодоступным участкам.



2000 RPM	Контурирование		Шлифование		Полирование		Глянцевание	
Абразивность	Грубый		Средний		Мягкий		Супермягкий	
Диаметр	12,6 мм	9,6 мм	12,6 мм	9,6 мм	12,6 мм	9,6 мм	12,6 мм	9,6 мм
Арт. № 50 шт.	2088С/50	2087С/50	2086М/50	2085М/50	2084F/50	2083F/50	2082SF/50	2081SF/50
Арт. № 100 шт.	2088С/100	2087С/100	2086М/100	2085М/100	2084F/100	2083F/100	2082SF/100	2081SF/100

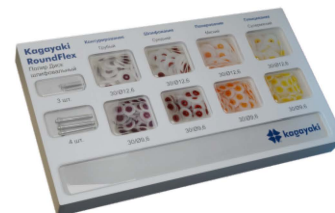



ФОРМЫ ВЫПУСКА:

- 50 шт. (без дискодержателей)
* № арт. в таблице
- 100 шт. (без дискодержателей)
* № арт. в таблице
- 40 шт. (ассортимент, в комплект входят дискодержатели из нержавеющей стали)
№ Арт. 2030/40 (Ø - 12,6 мм),
№ Арт. 2029/40 (Ø - 9,6 мм).
- 240 шт. (по 30 шт. все виды дисков, 3 коротких и 4 стандартных дискодержателя)



Арт. № 9201 — 1 коробка — по 30 шт. все виды дисков, 3 коротких, 4 стандартных дискодержателя

Арт. № 0020SL — 1 пакет — дискодержатели 1 короткий, 2 стандартных

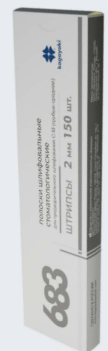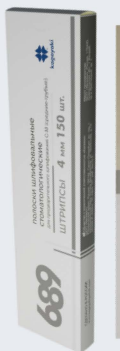

689/287/281/683

ШТРИПСЫ

2 ВАРИАНТА
ШИРИНЫ:

4 ММ. / 2 ММ.
287/689 281/683

Предназначены для предварительного и окончательного шлифования
с цветной кодировкой в зависимости от степени абразивности.
Тонкие на гибкой основе.

Одна полоска совмещает 2 степени абразивности.

В упаковке 150 шт.

Арт. № 294689 (689) | Арт. № 294281 (281)
Арт. № 294287 (287) | Арт. № 294683 (683)



Kagayaki Kurin One

ПАСТА ДЛЯ ЧИСТКИ

Предназначена для снятия лёгких зубных отложений, а также для предварительной полировки реставраций из композитов, амальгамы, золота.

В состав входит диоксид кремния.
Средний размер частиц - 40 мкм.
Твердость по шкале Мооса - 5,5 - 6 ед.

БЕЗ ФТОРА

Арт. № 3031 (анис)

KURIN ONE

показания к применению:

- пятна от табака и пищи;
- дисперсный слой после полирования;
- недостаточная гладкость пломбы.

KURIN TWO

показания к применению:

- недостаточная гладкость поверхности пломбы;
- отсутствие блеска;
- твердые зубные отложения.

Форма выпуска:
туба 50 гр.

Форма выпуска:
туба 50 гр.



Kagayaki Kurin Two

ПАСТА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

Предназначена для придания зеркального блеска реставрациям из композитов, амальгамы, золота, а также для полировки эмали зуба.

В состав включены смесь глинозема и кремнезема, благодаря которым полировка становится эффективнее.

Кремнезем: средний размер частиц - 11 мкм.,
твердость по шкале Мооса - 7 ед.

Глинозем (смесь): размер частиц от 0,2 до 2,7 мкм.,
твердость по шкале Мооса - 8-9 ед.

БЕЗ ФТОРА

Артикул №3032 (анис)



«Kurin One», «Kurin Two», «Bowl»

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДВУХЭТАПНОЙ ЧИСТКИ И
ПОЛИРОВКИ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ
ТКАНЕЙ ЗУБОВ

Артикул №9301 - 1 коробка:
паста «Kurin One» 1 туба,
паста «Kurin Two» 1 туба,
щетка «Bowl» чаша полая 25 шт.



Чаша	полая	полая короткая	узкая	пламя
Артикул №	1013	1015	1014	1011

Kagayaki Bowl

ЩЕТКА ИЗ НЕЙЛОНА

Предназначена для работы с полирувальными пастами во время профессиональной чистки зубов и полировки поверхности реставраций из композитных материалов.

ПОДХОДИТ ДЛЯ УГЛОВОГО НАКОНЕЧНИКА

В упаковке 100 шт.



Kagayaki Mira Zr

ПАСТА ДЛЯ ЧИСТКИ И ПОЛИРОВКИ

Профессиональная паста для чистки зубов, снятия твёрдых зубных отложений, пигментации, а также для полировки композитных реставраций.

Содержание в составе пасты измельчённого циркония усиливает абразивные свойства.

БЕЗ ФТОРА

- Банка 50 гр. Арт. №3012 (мята)
- Туба 120 гр. Арт. № 3013 (мята)
- Мини-дозы 100 шт. по 2 гр. Арт. №3017

Спеченные нанобразивные

частицы позволяют убрать с реставрации глубокие царапины от контурирующего инструмента.

Благодаря им можно довести поверхность реставрации до блеска за 1 подход полировки.

Реологические добавки уменьшают разбрызгивание пасты в полости рта, оставаясь только в зоне полировки.

Форма выпуска:

- банка 50 гр.,
- туба 120 гр.,
- мини-дозы 100 шт. по 2 гр.



Kagayaki Mira

ПАСТА ДЛЯ ЧИСТКИ И ПОЛИРОВКИ

Профессиональная паста для чистки зубов, удаления пятен от табака и пищи, а также для тонкого шлифования композитных реставраций.

БЕЗ ФТОРА

Форма выпуска:
банка 45 гр.

Артикул №3014 (мята)



Kagayaki Wave

ПОЛИРЫ ЧАШЕЧКИ НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ

Предназначены для щадящего снятия зубных отложений, полировки эмали зуба, проведения окончательной обработки и полировки механическим способом поверхности прямых и различных ортопедических реставраций.

Wave-SF

предназначены для пациентов с более чувствительными деснами и эмалью.

В упаковке 30 или 100 шт.

Арт. №1034Н – Wave-H, 30 шт.
Арт. №1038Н – Wave-H, 100 шт.
Арт. №1032SF – Wave-SF, 30 шт.
Арт. №1036SF – Wave-SF, 100 шт.



Kagayaki Henka

ПАСТА ДЛЯ ЧИСТКИ И ПОЛИРОВКИ

Универсальная профессиональная паста, осуществляющая эффективную чистку и полировку за счет изменения абразивности.

ПРИРОДНОЕ ВУЛКАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО

в составе сначала работает, как очищающий агент, а после разрушения частиц позволяет осуществлять полировку.

ДО НАЧАЛА ПОЛИРОВКИ:

- средний размер частиц - 40 мкм,
- твердость по Моосу - 5-7 ед.

Через 20 сек. размер частиц **сокращается на треть.**

Артикул №3022 (мята)
Артикул №3021 (яблоко)

БЕЗ ФТОРА

Форма выпуска: туба 115 гр.



*Входит в Комплект для финишной полировки Дениса Крутикова от Kagayaki

Kagayaki Daiyamondo


АЛМАЗНАЯ ПАСТА ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ

Предназначена для придания гладкости, ослепительного блеска реставрациям и естественной эмали зубов, а также для придания ультраблеска изделиям из металла и керамики.

**ПАСТА С АЛМАЗНОЙ ПУДРОЙ (0,1 - 1 МКМ)
АБРАЗИВНОСТЬ - 1 МКМ.
ТВЕРДОСТЬ ПО МООСУ - 10 ЕД.**

Форма выпуска:
4 гр. упаковка (шприц 1 гр.)

Арт. № 3043

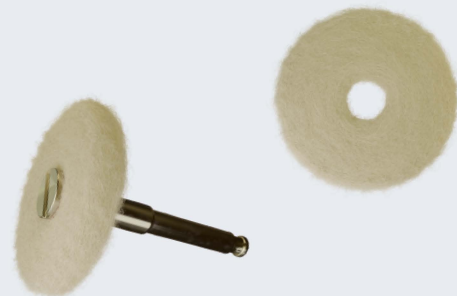

Kagayaki Disuku F

ТОНКОШЕРСТНЫЕ ВОЙЛОЧНЫЕ КРУГИ

Предназначены для окончательной полировки реставраций из композитов, керамики и виниров с использованием полировочной пасты. Впитывающие свойства шерсти предотвращают разбрызгивание пасты во время процесса полировки, что значительно уменьшает расход пасты.

В комплект входят два дискодержателя из нержавеющей стали:
1 для прямого и 1 для углового наконечников.

В упаковке 25 шт.



Арт. № 0060	1 пакет
для углового	3 шт.

Арт. № 0061	1 пакет
для прямого	3 шт.

Арт. № 6011, Ø 17 мм,
S 3 мм — войлок,
2 дискодержателя: 1 для
прямого и 1 для углового
наконечников



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИНИШНОЙ ПОЛИРОВКИ
ПРЯМОЙ КОМПОЗИТНОЙ РЕСТАВРАЦИИ

Дениса Крутикова

Почётный профессор ТГСИ

Стоматолог-ортопед-терапевт

Международный лектор по реставрации зубов

Style Italiano Silver Member

Состав набора:

Полир «Kagayaki Enforce Pin» 125 мк. - 9 шт. (по 3 шт. чаша, конус, диск)

Полир «Kagayaki Enforce Pin» 70 мк. - 9 шт. (по 3 шт. чаша, конус, диск)

Полир «Kagayaki Enforce Pin» 32 мк. - 9 шт. (по 3 шт. чаша, конус, диск)

«Kagayaki RoundFlex» Полир Диск шлифовальный, d - 9,6 мм. - 10 шт.

(по 5 шт. мягкой и супермягкой абразивности)

«Kagayaki RoundFlex» Полир Диск шлифовальный, d - 12,6 мм. - 10 шт.

(по 5 шт. мягкой и супермягкой абразивности)

Дискодержатель для RoundFlex - 2 шт. (1 длинный, 1 короткий)

Полир Щетка «Kagayaki Sharp» 2 - карбидная - 5 шт.

Полир щетка для полировальной пасты «Kagayaki Flat» - козья шерсть,

6-конечная звезда - 10 шт.

Войлочный круг «Kagayaki Disuku» 5-конечный - 30 шт. + 3 дискодержателя

Daiyamondo паста алмазная 1 мк. (водорастворимая) - 1 шприц (1 гр.)

Kagayaki Flat

ЩЕТКА В ФОРМЕ ДИСКА

Изготовлена из высококачественной козьей шерсти, создана для придания керамическим и композитным элементам реставраций тонкого блеска.

ПОДХОДИТ ДЛЯ УГЛОВОГО НАКОНЕЧНИКА

*Входит в Комплект для финишной полировки
Дениса Крутикова от Kagayaki

В упаковке 10 шт.

Артикул №1322, d - 14 мм.



Kagayaki Flat Hard **NEW**


ЩЕТКА В ФОРМЕ ДИСКА

Изготовлена из высококачественной козьей щетины. Создана для придания зеркального блеска керамическим и композитным реставрациям.

Возможно использование как с применением алмазных паст, так и как самостоятельный инструмент для окончательной полировки. Увеличение скорости полирования реставрации с использованием щетки достигается благодаря плотному расположению щетинок.

В упаковке 10 шт.

Артикул №1422, d - 14 мм.

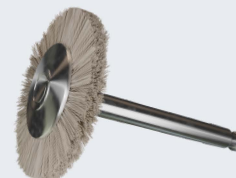

Kagayaki Sharp

ЩЕТКА

Предназначена для ультраполировки окклюзионных и вогнутых поверхностей реставраций из композитов, стеклоиономеров и керамики без применения паст. Наполнена абразивными частицами карбида кремния.

В упаковке 10 шт.

ДЛЯ УГЛОВОГО НАКОНЕЧНИКА

Kagayaki Sharp 2 **NEW**

ЩЕТКА МЯГКАЯ

Предназначена для получения гладкой (зеркальной, глянцевой) поверхности реставрации.

В упаковке 10 шт.

*Входит в Комплект для финишной полировки Дениса Крутикова от Kagayaki



Чаша	полая	узкая	пламя
Артикул №	1113	1114	1111
Количество	4 шт.	3 шт.	3 шт.

Ассортимент
Арт. 1101/10 шт.



Чаша	полая	узкая	пламя
Артикул №	1213	1214	1211
Количество	4 шт.	3 шт.	3 шт.

Ассортимент
Арт. 1201/10 шт.

Беззолные штифты

Ø 0.8	108	208	308
Артикул №	108W	208Y	308R
Цвет	белый	жёлтый	красный

В упаковке 100 шт.



Счетчики использования инструментов

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИЗНОСА
ИНСТРУМЕНТА.

Цвет	Жёлтый	Синий	Красный
Артикул №	SDY	SDB	SDR

В упаковке 100 шт.





Kagayaki Katakana

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ
КЕРАМИКИ И ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ

Предназначена для придания зеркального блеска реставрациям из гибридных композитов, керамики и диоксида циркония.

**для ПРИМЕНЕНИЯ
В ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ**

Форма выпуска: банка 10 гр.

Артикул № 3070



Kagayaki Disuku Z

ТОНКОШЕРСТНЫЕ ВОЙЛОЧНЫЕ КРУГИ

Предназначены для окончательной полировки реставраций из композитов, керамики и виниров с использованием полировочной пасты. Впитывающие свойства шерсти предотвращают разбрызгивание пасты во время процесса полировки, что значительно уменьшает расход пасты.

В комплект входят два дискодержателя из нержавеющей стали:
1 для прямого и 1 для углового наконечников.

В упаковке 25 шт.







Арт. № 0060	1 пакет
для углового	3 шт.



Арт. № 0061	1 пакет
для прямого	3 шт.

Арт. № 6012, Ø 25 мм,
S 5 мм — войлок,
2 дискодержателя: 1 для
прямого и 1 для углового
наконечников

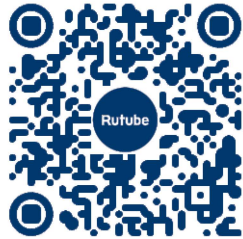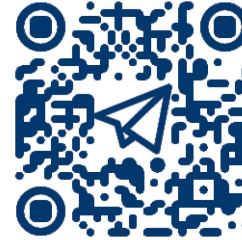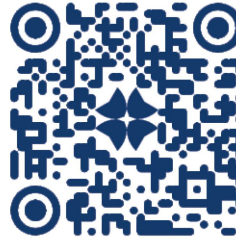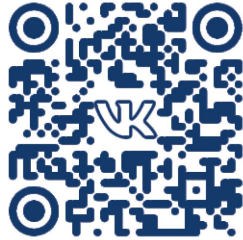

Общество с ограниченной ответственностью «Кагаяки»
Адрес юридического лица: Россия, 199155, Санкт-Петербург,
вн. тер. г. муниципальный округ Остров Декабристов,
ул. Уральская, д. 13, литера И, помещ. 1Н, офис 101, раб. место 2.

Адрес места производства: Россия, 175430, Новгородская обл.,
г. Валдай, пр-д Крестецкий, здание 1.

Отдел продаж: +7 911 024-33-16 (WhatsApp, Viber, Telegram)

Жалобы и рекламации направлять на e-mail:
info@kagayakipolish.com

www.kagayakipolish.com



