



ЕАС



СТОЛ ЗУБНОГО ТЕХНИКА СЗТ 4.3 МАСТЕР МИНИ




**Руководство по эксплуатации
АВЕ 554.000.000 РЭ**

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ22.В.13246/18
от 28.11.2018


ПРАЙС АВЕРОН всегда под рукой на мобильном



Приложение ПРАЙС АВЕРОН
для Android на

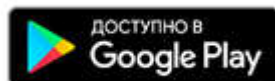

<https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.averon.averonpricemif>

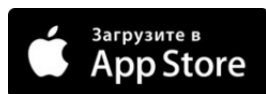

Приложение ПРАЙС АВЕРОН
для IOS (iPhone и iPad) на



<https://apps.apple.com/ru/app/прайс-аверон/id1484614177>

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на Стол зубного техника серия СЗТ МАСТЕР МИНИ (далее – **СЗТ**). ГОСТ 16371-2014.

1.2 СЗТ предназначен для оснащения индивидуального рабочего места зубного техника и может использоваться в зуботехнических и литейных лабораториях стоматологических учреждений.

1.3 Особенности

- полностью металлическое исполнение;
- уровни столешниц СЗТ 4.3 МАСТЕР МИНИ и СЗТ 4.3 МАСТЕР совпадают и позволяют создать единое рабочее пространство;
- устойчивое положение стола, регулируемое вращением ножек;
- многофункциональная задняя стенка, два встроенных отсека;
- универсальная боковая ПАНЕЛЬ 1.0 САЙД АРТ, левое/правое исполнение;
- крышка задней стенки может использоваться в двух вариантах:
 - «крышка» для закрывания полости задней многофункциональной стенки
 - «панель» для установки выше уровня верхней полки **СЗТ** и навешивания рейлингов, лотков ЛОТОК 1.0 МАСТЕР.

Также крышку можно закрепить как панель на стену.

- выдвижные упоры (подлокотники) для рук и финагель;
- переставляемый съемный мобильный наклонный лоток;
- ЭЛЕКТРОБЛОК 5.0 сетевой фильтр на 5 розеток с заземлением и магнитной фиксацией в удобном для работы месте (общий выключатель с индикацией, защита от превышения нагрузки, фильтр помех, максимальный ток 10 А).

1.4 По дополнительной заявке (☒) можно доукомплектовать:

- светильником ЛЮКС НЬЮ/СУПЕР/ЛЕД, ЛЮКС ЛИНЗА;
- многофункциональным стулом зубного техника СТУЛ 1.3 МАСТЕР; ПОЛКОЙ БРИДЖ, ПОЛКОЙ КОНЕР, ПАНЕЛЬЮ БРИДЖ/БИГ для эффективного использования пространства между двумя и более **СЗТ**;
- ПОЛКОЙ ЛОКАЛ, ПАНЕЛЬЮ СЗТ, СТЕЛЛАЖОМ МАСТЕР для эффективного использования рабочего пространства отдельно взятого стола;
- подкатной тумбой ТУМБА 1.1 М;
- вытяжным модулем ВМУ 3.x БАЗИС;
- модулем с выдвижными ящиками КОМПЛЕКТ 2.0;
- автономным фильтр-циклоном АФЦ МИНИ;
- блоком регулятора мощности БРМ 2.1 ВМУ;
- бормашиной БМ ЭКО ПРОФИ/ОПТИМУМ с внешним пультом для управления подключенными к блоку наконечником бормашины и вытяжкой, а также подачи электропитания на используемые с **СЗТ** устройства.

Подробная информация о дополнительных устройствах и принадлежностях – в соответствующих подразделах раздела «Столы, светильники, вытяжки» Каталога оборудования на сайте www.averon.ru.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°C
- влажность при 25°C, не более 80%

2.2 Основные технические характеристики

- габариты, без подлокотников, СО, держателя стакана, не более 705×660×1150 мм
- столешница: - ширина 700 мм
- глубина 600 мм
- высота над уровнем пола, не более 875 мм
- масса, не более 40 кг
- максимальная нагрузка на столешницу 120 кг
- рабочее давление (обдувочное сопло) 3...6 атм

2.3 Комплектность согласно УПАКОВОЧНОМУ ЛИСТУ АВЕ 554.000.000 Д2.



АВЕРОН

научно-производственный комплекс

Учебный центр АВЕРОН

приглашает на обучение
зубных техников, врачей,
руководителей и администраторов
стоматологических учреждений

Программа на
<http://www.averon.ru/study/>



КОНТАКТЫ АВЕРОН



averon.ru



Averon Russia



8 800 700-12-20
бесплатный по РФ



АВЕРОН -
оборудование
для зубных
техников



feedback@averon.ru






instagram.com/
averon.ru

Присоединяйтесь к нам в соц. сетях!


Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

АВЕ 554.000.000 РЭ


3 УСТРОЙСТВО

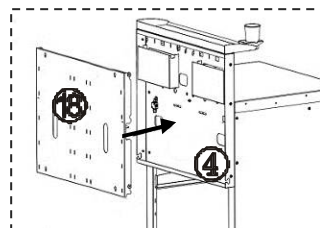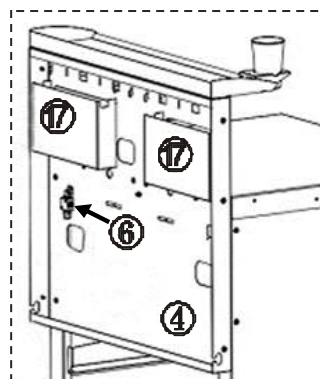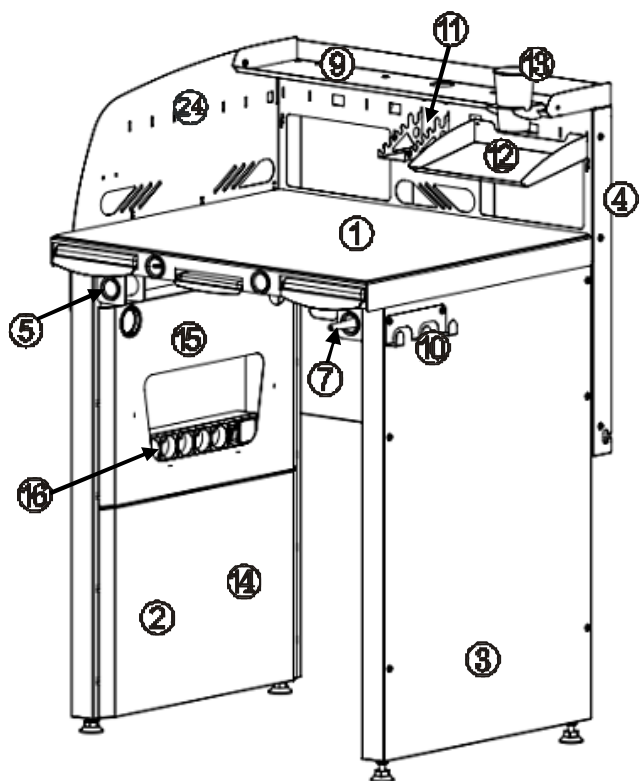


Подлокотники
и финагель в лотке

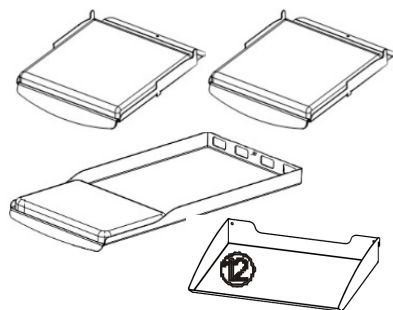


- 1 – столешница с настольным покрытием, выдвижными подлокотниками и финагелем
- 2 – стенка боковая левая
- 3 – стенка боковая правая
- 4 – задняя многофункциональная стенка
- 5 – держатель сопла обдувочного
- 6 – пневмоблок с пневмошлангом
- 7 – сопло обдувочное СО (возможно левое/правое расположение)
- 8 – см. Инструкцию по сборке АВЕ 554.000.000 ИЗ
- 9 – полка верхняя
- 10 – крючок
- 11 – подставка под пульт управления ПОДСТАВКА 6.1 ТУЛЗ
- 12 – мобильный наклонный ЛОТОК 1.0 МАСТЕР
- 13 – стакан с кронштейном
- 14 – декоративная фальшь-панель боковой стенки
- 15 – декоративная панель боковой стенки с карманом
- 16 – ЭЛЕКТРОБЛОК 5.0 с магнитной фиксацией
- 17 – карман задней стенки
- 18 – крышка-панель задней стенки
- 24 – ПАНЕЛЬ 1.0 САЙД АРТ

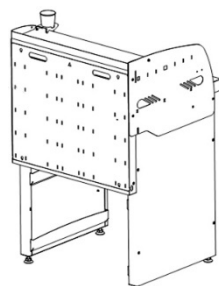

Перевод подлокотников из положения хранения в рабочее:

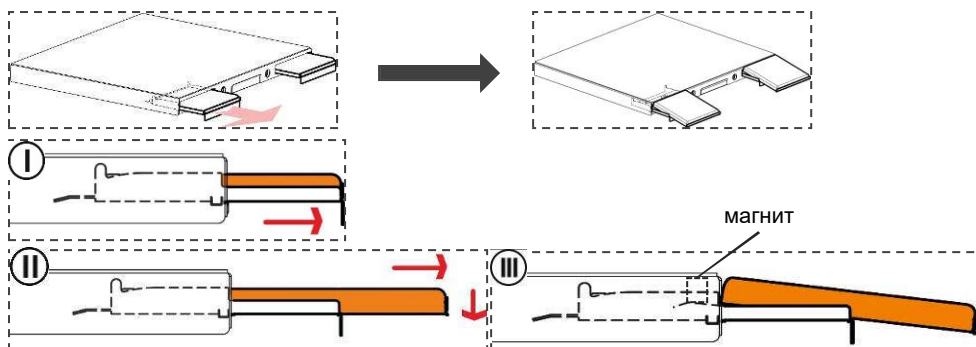

Переустановка подлокотников:

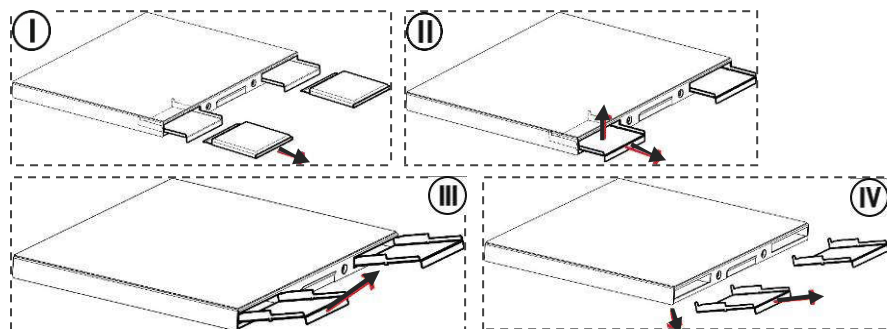

Покрытие закреплено на столешнице и защищает ее поверхность от повреждений, например, абразивом при работе с бормашиной.

Пазы в торцах задней стенки у нижних углов - для прокладки проводов при соединении нескольких столов.



Декоративные фальшь-панели полностью закрывают внутренности боковых стенок, в каждой стенке состоят из двух половин: нижняя сплошная, верхняя с карманом и окнами для вывода проводов (под электроблок).


Проволока намоточная - для фиксации проводов и шлангов.

КРОТ 1.0 - приспособление для протягивания проводов и пневмошланга внутри столешницы.

Крышка (18) устанавливается внутрь задней стенки (4) треугольником вверх (▲), удерживаясь магнитами, режим «крышка».
Возможна установка крышки (18) выше уровня верхней полки (9) и использование ее для навешивания рейлингов, лотков и др.
Переверните крышку для использования ее в режиме «панель», треугольник поменяет свое расположение (▼).

Установка ПАНЕЛИ 1.0 САЙД АРТ – согласно Инструкции по сборке АВЕ 554.000.000 ИЗ.

ПАНЕЛЬ-КРЫШКА 4.2 СЗТ МИНИ с аналогичным функционалом предназначена для доукомплектования ранее приобретенных столов СЗТ 4.2 МАСТЕР МИНИ.

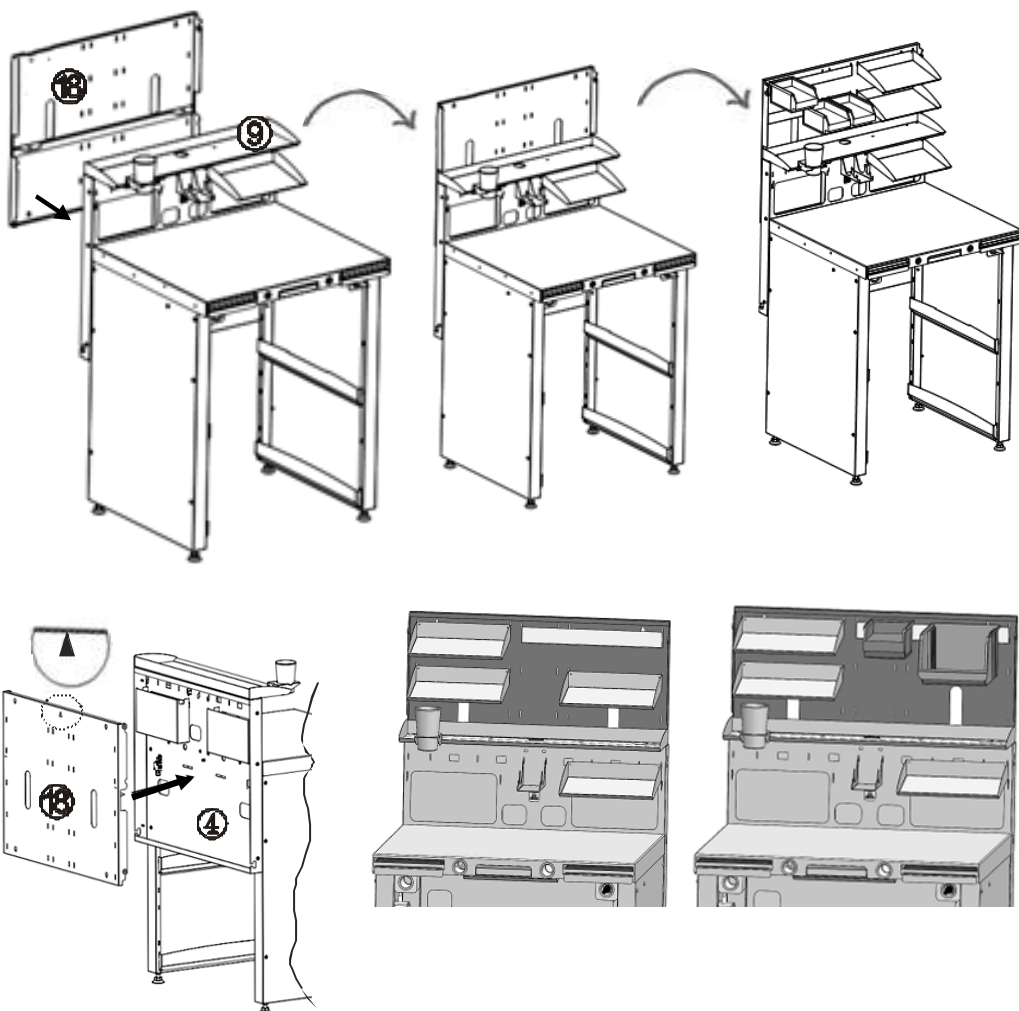

При работе с бормашиной наконечник удобно хранить с использованием фиагеля, для чего необходимо перевернуть лоток отгибом вверх и снова поставить его в окно торца столешницы.



ВНИМАНИЕ!

Обесточивать ведущий ЭЛЕКТРОБЛОК 5.0 при подключении/отключении оборудования и по завершении работ.

Не допускать воздействия на столешницу и подлокотники абразива, режущего инструмента, а также длительного воздействия влаги.

4 ПОРЯДОК СБОРКИ

См. Инструкцию по сборке АВЕ 554.000.000 ИЗ.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистку поверхностей **СЗТ** проводить влажной мягкой тканью (губкой), смоченной в слабом мыльном растворе, при отключенной вилке блока электропитания от сетевой розетки.

6 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

www.averon.ru

бесплатный звонок по России 8 800 700-12-20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 feedback@averon.ru

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700-11-02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

СЗТ 4.3 МАСТЕР МИНИ	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.