

"ЗВГ-01 "Супергипс-Ц", тип III

Используется для изготовления моделей челюстей в ортопедической стоматологии при протезировании литыми и бюгельными протезами, а также для изготовления комбинированных протезов.

Технические характеристики:

- Рабочее время: 7-10 минут
- Прочность при сжатии через 1 час: не менее 25 МПа
- Линейное расширение: не более 0,15
- Цвет материала: розовый, голубой

Способ применения: для получения правильной консистенции гипсового теста, количество воды должно составлять для "ЗВГ-01 "Супергипс-Ц" (тип 3) — 28-30 мл. Гипс засыпать в чашку с водой. Ручное замешивание производить в течение 60 секунд, замешивание с помощью вакуумного смесителя производить в течение 30 секунд. При заливке слепка использовать вибростол. Изъятие модели про-изводить не ранее чем через 45 минут после заливки!

Необходимые меры предосторожности: категорически запрещается использовать "ЗВГ-01 "Супергипс-Ц" в полости рта.

Форма выпуска: "ЗВГ-01 "Супергипс-Ц", тип III, цвет розовый – пластиковое ведро, 5 кг

Гарантийный срок хранения: 2 года.

Условия хранения: "ЗВГ-01 "Супергипс-Ц", тип 3 следует хранить в закрытых складских помещениях в упакованном виде при температурах от 5 до 27°C

Гарантия производителя: Производитель гарантирует заявленные характеристики отлитых моделей исключительно при условии строго соблюдения условий хранения материалов и четкого выполнения методики подготовки гипсового теста (соблюдении пропорции вода/порошок, времени замешивания, времени изъятия модели из слепка).

Для изготовления цоколей разборных и не разборных моделей.

- идеальное воспроизведение мельчайших деталей, за счет высокой степени измельчения гипса и отсутствия пузырьков воздуха;
- оптимальное время твердения и высокие прочностные показатели позволяют вынимать отливку из слепка через 45 минут;
- равномерно окрашен в розовый цвет неорганическим стабильным, светостойким красителем

материал отвечает всем требованиям ИСО 6873 и ГОСТ Р 51887-2002 «Стоматологические гипсы».