

"ГВЗ-02/35 "Супергипс-Ц", тип IV

Используется для изготовления комбинированных разборных гипсовых моделей челюстей и штампов при протезировании фарфоровыми и металлокерамическими протезами.

Технические характеристики:

- Рабочее время: 7-10 минут
- Прочность при сжатии через 1 час: не менее 35 МПа
- Линейное расширение: не более 0,1 %
- Цвет материала: бежевый

Способ применения: для получения правильной консистенции гипсового теста, количество воды должно составлять для "ГВЗ-02/35 "Супергипс-Ц", тип IV — 21-23 мл на 100 г порошка. Гипс засыпать в чашку с водой. Ручное замешивание производить в течение 60 секунд, замешивание с помощью вакуумного смесителя производить в течение 30 секунд. При заливке слепка использовать вибростол. Изъятие модели производить не ранее чем через 45 минут после заливки!

Необходимые меры предосторожности: категорически запрещается использовать "ГВЗ-02/35 "Супергипс-Ц" в полости рта.

Форма выпуска: "ГВЗ-02/35 "Супергипс-Ц", тип IV, цвет бежевый – пластиковое ведро, 3 кг

Гарантийный срок хранения: 2 года.

Условия хранения: "ГВЗ-02/35 "Супергипс-Ц", тип IV следует хранить в закрытых складских помещениях в упакованном виде при температуре от 5 до 27°C

Гарантия производителя: Производитель гарантирует заявленные характеристики отлитых моделей исключительно при условии строго соблюдения условий хранения материалов и четкого выполнения методики подготовки гипсового теста (соблюдении пропорции вода/порошок, времени замешивания, времени изъятия модели из слепка).

Для разборных и не разборных рабочих моделей.

- идеальное воспроизведение мельчайших деталей, за счет высокой степени измельчения гипса и отсутствия пузырьков воздуха;
- оптимальное время твердения и высокие прочностные показатели позволяют вынимать отливку из слепка через 45 минут;
- равномерно окрашен в бежевый цвет неорганическим стабильным, светостойким красителем
- материал отвечает всем требованиям ИСО 6873 и ГОСТ Р 51887-2002 «Стоматологические гипсы».

3,0 кг гипса в ведре.