

3-CP Бонд

Кристаллический порошок для улучшения отражения света и эстетики, для предотвращения появления желто-зеленого оттенка во время изготовления искусственных зубов.

Сфера применения: Все не драгоценные металлы для эстетического использования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка металлической поверхности

Обработка оксидом алюминия. Очистите пароструйным аппаратом или в ультразвуковой ванне, или прокипятите в дистиллированной воде в течение 10 минут.

При необходимости дегазировать в соответствии с инструкциями используемого сплава. Металлическая структура должна быть полностью сухой. Металлический предмет нужно держать только чистым пинцетом.

Смешайте 3-CP Бонд с дистиллированной водой до образования однородной пасты. Нанесите материал тонким слоем. Не покрывайте маргинальные области. Оставьте минимальное пространство не менее 2 мм.

Нельзя повторно использовать уже смешанный 3-CP Бонд.

Инструкция по обжигу: см. Таблицу.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При контакте с кожей (при аллергии) промыть водой с мылом.

ХРАНЕНИЕ

Хранить 3-CP Бонд в сухом месте в плотно закрытом контейнере.

Таблица обжига

Всегда обжигайте 3-CP Бонд под вакуумом.

Температура сушки 450°C

Время сушки ± 1-2 min

Температура предварительного нагрева 650 °C

Скорость нагрева 55 °C/Min.

Температура обжига 980 °C

Время обжига 1 мин

Скорость охлаждения 60 °C/min

Охлаждение на воздухе после обжига Да