

Форм-карта зубов

Ivoclar Vivadent:


Ivocryl




Ivocryl

Верхние фронтальные зубы


Овальные

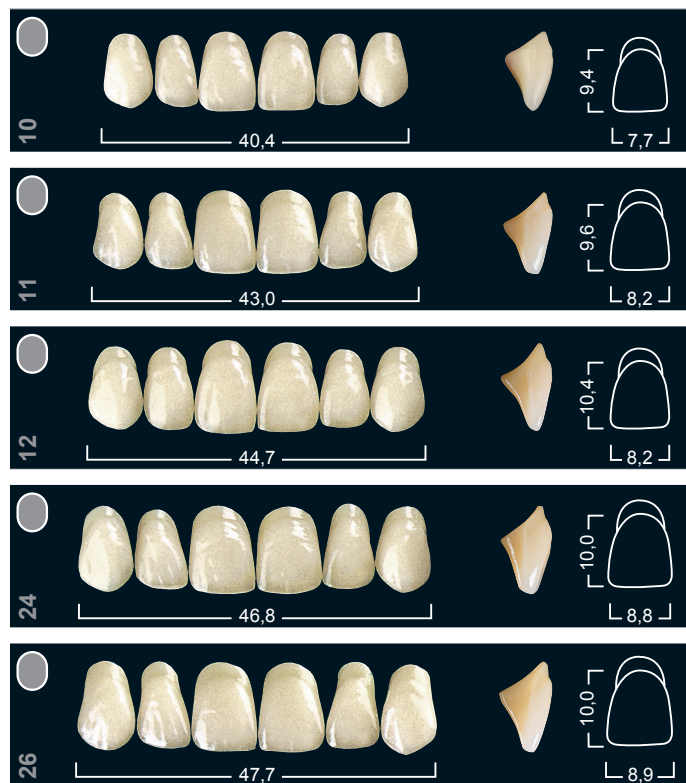

Прямоугольные

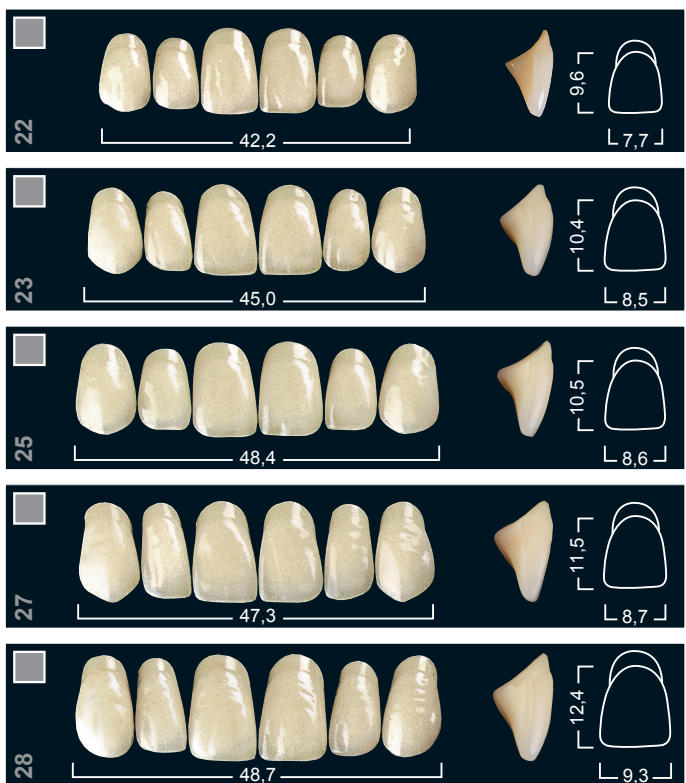

Треугольные

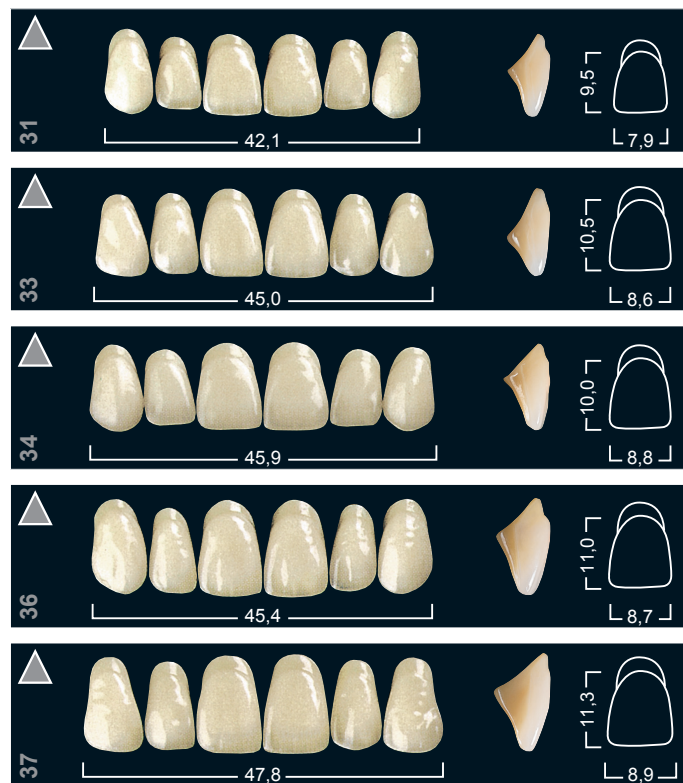

Критерии выбора

Существует множество методов выбора формы зубов, к которым можно отнести форму головы, строение тела и мужской или женский тип.

Однако, дополнительно к этому, если информация о размере, форме и расположении зубов полностью отсутствует, за исходные данные можно принять форму верхней челюсти. Из большого числа форм верхней челюсти принципиально можно выделить три основных типа:

- овальная
- треугольная
- прямоугольная

Верхние фронтальные зубы Ivocryl по их анатомическому строению подразделяются на три основные группы:

Овальная форма зубов

Эта группа характеризуется сильными изгибами, которые проявляются, прежде всего, в выраженном лабиальном изгибе. Овальная форма альвеолярного гребня чаще всего встречается в случаях с глубоким прикусом.

Треугольная форма зубов

Эта группа отличается узкими зубами, с сужающейся в цервикальной области формой коронковой части. Вертикальный лабиальный изгиб выражен средне. Центральный резец имеет треугольную форму. Альвеолярный гребень также имеет треугольную форму и указывает на вероятность перекрестного прикуса.

Прямоугольная форма зубов

Такие зубы имеют скорее прямоугольную форму. Центральный резец доминирует. Вертикальный лабиальный изгиб выражен слабо. Альвеолярный гребень имеет выраженную прямоугольную форму и указывает на ортонатический и прикус.

Нижние фронтальные зубы

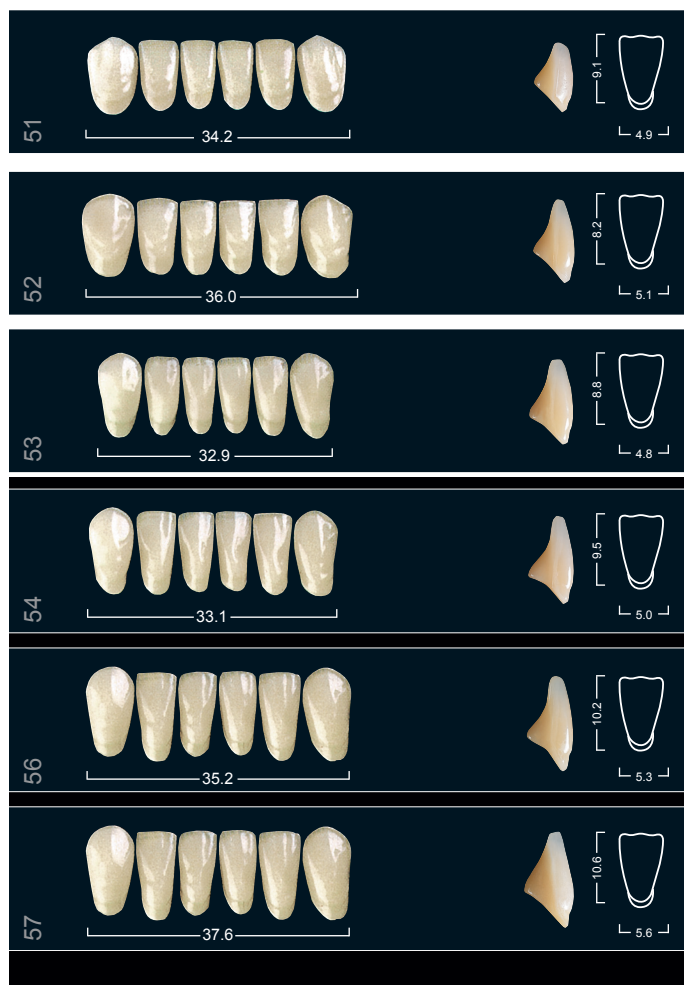


Таблица комбинирования

Форма	Фронтальные зубы		Боковые зубы
	Верхние	Нижние	
	10	51/53	28/89
	11	51/53	28/29
	12	52/56	30
	24	52/56	30
	26	52/56	30/32
	31	53/54	28/29/31
	33	52/56	30/32
	34	52/56	30
	36	54/56	30/32
	37	56/57	30/32
	22	54	28/31
	23	56	30/32
	25	57	32
	27	54/56	32
	28	57	32

Формы фронтальных зубов 10, 23, 25, 27 и 28, а также боковых зубов 29 и 31 выпускаются только в цветах Bleach и A-D.