

ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ




Высокая сила сцепления

Tetric N-Bond Universal достигает высоких значений адгезии к эмали и дентину при нанесении только одним слоем, при этом сила адгезии не меняется, независимо от примененного протокола травления.

Полимеризация светом, предшествующая постановке не прямой реставрации активирует кислотосодержащие мономеры, обеспечивая превосходную полимеризацию переходной зоны между адгезивом и композитным цементом. Дополнительный активатор двойного отверждения не требуется.

Минимальный риск постоперативной чувствительности

Гидрофильный растворитель, содержащийся в Tetric N-Bond Universal обеспечивает оптимальное увлажнение дентина и эмали. Это приводит к увеличению глубины проникновения и достижению оптимальной инфильтрации дентинных канальцев. Как результат, снижается риск микроподтеканий и возникновения постоперационной чувствительности.

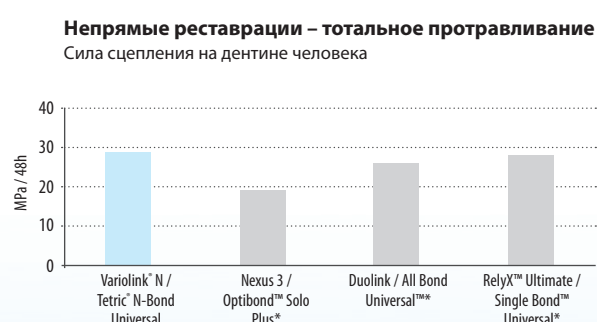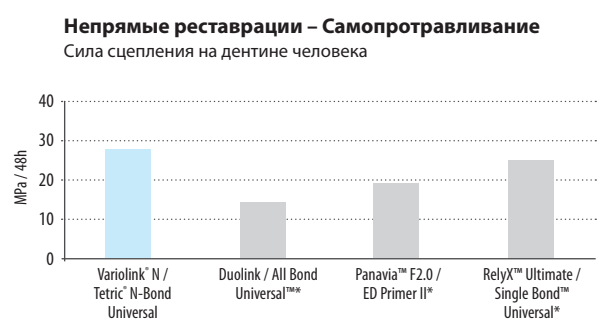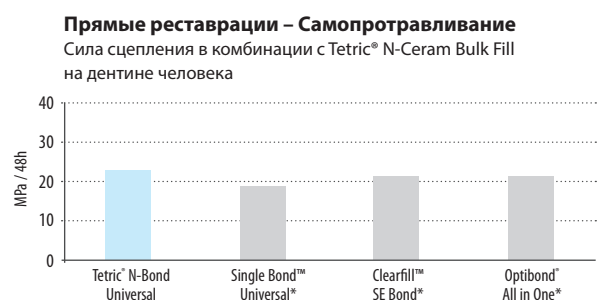


* Не являются зарегистрированными товарными знаками Ivoclar Vivadent AG.
Источник: Доктор E. Mahn, Universidad de los Andes, Chile, 2014



Прямая реставрация

Tetric N-Bond Universal входит в категорию продуктов "Прямая реставрация". Продукты из этой категории охватывают все этапы прямой реставрации зубов - от препарирования до ухода за полостью рта после реставрации. Все продукты оптимально сочетаются друг с другом, обеспечивая успешное создание прямых реставраций.

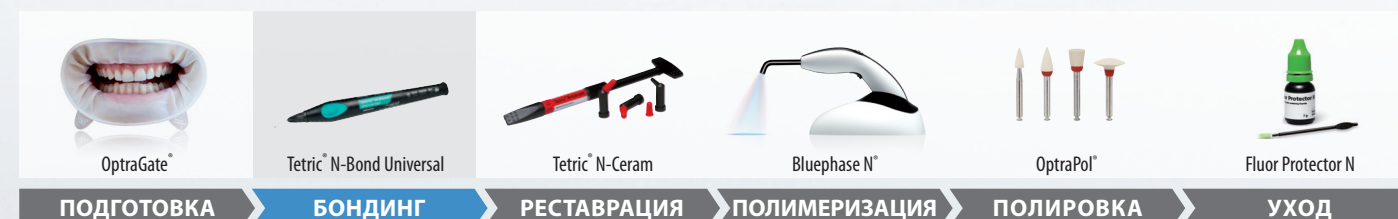

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ

Tetric® N-Ceram Bulk Fill

Нанооптимизированный композит 4 мм



4 мм для успеха

- Внесение одной порцией возможно благодаря содержанию запатентованного фотоинициатора Ivocerin
- Низкая полимеризационная усадка за счет специальной технологии наполнителя
- Эстетический результат в боковом отделе зубного ряда – легко и быстро

Fluor Protector N

Защитный фторсодержащий лак



Лучшая защита от кариеса и эрозии зуба

- Эффективность - мгновенное фторирование эмали
- Удобство - готов к немедленному применению
- Выгода - экономное использование


NEW

Tetric® N-Bond Universal

Многоцелевой универсальный адгезив



Селективное протравливание

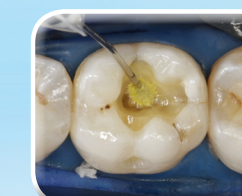

Самопротравливание



Тотальное протравливание

Универсальный адгезив для прямых и непрямых реставраций

Вы хотели бы узнать больше о продуктах категории "Прямая реставрация"? Просто свяжитесь с Вашим представителем Ivoclar Vivadent или посетите сайт www.ivoclarvivadent.com.

ООО «Ивоклар Вивадент»
Россия | Москва | 115432 Проспект Андропова 18, корп. 6, офис 10-06
Тел: +7 (499) 418-03-00
Факс: +7 (499) 418-03-10
info.ru@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.ru

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation


ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Tetric® N-Bond Universal


УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Один адгезив для любой техники протравливания


Tetric N-Bond Universal - однокомпонентный светоотверждаемый адгезив для прямых и непрямых реставраций. Умеренная кислотность адгезива позволяет использовать его с любой техникой протравливания.

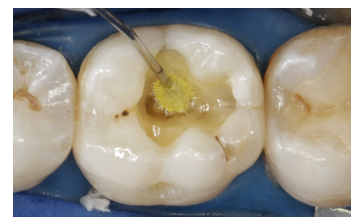

Один слой Tetric N-Bond Universal наносится на поверхность зуба и втирается минимум 20 сек.

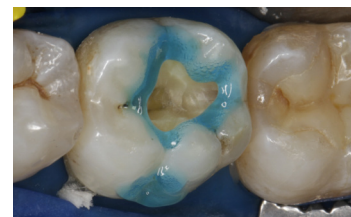

Фосфорная кислота наносится только на поверхность эмали на 15-30 сек. Tetric N-Bond Universal наносится на эмаль и дентин и втирается в течение 20 сек.

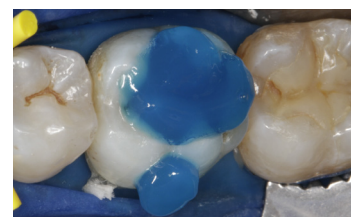

Фосфорная кислота наносится на поверхность как эмали (15-30 сек.) так и дентина (10-15 сек). Tetric N-Bond Universal наносится на эмаль и дентин и втирается 20 сек.

R&D, Ivoclar Vivadent AG, 2013.

Рекомендован для прямых и непрямых реставраций

Благодаря особому составу, адгезив Tetric N-Bond Universal может также применяться в качестве адгезива с композитными цементами. Адгезивный протокол идентичен для прямых и непрямых реставраций.

- Сверхтонкая пленка (10 µm), образующаяся после полимеризации облегчает припасовку непрямой реставрации
- Мягкий протравливающий эффект адгезива обеспечивает совместимость с различными материалами для фиксации (светового, двойного и химического отверждения)
- Не требует дополнительного активатора для применения с композитными цементами двойного отверждения

Самопротравливание

- Экономия времени
- Снижение риска постоперационной чувствительности

Селективное протравливание эмали

- Превосходная адгезия к эмали
- Улучшенное краевое прилегание

Тотальное протравливание

- Максимальная адгезия - и к эмали, и к дентину
- Улучшенное краевое прилегание


НИЗКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ТЕХНИКАМ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокая сила адгезии на сухом и влажном дентине

Tetric N-Bond Universal содержит в своем составе гидрофильные и гидрофобные компоненты. Особые гидрофильные компоненты оптимизируют увлажненность дентина.

Поэтому сила сцепления с дентином остается неизменной даже при предварительном протравливании фосфорной кислотой и на пересушенной поверхности дентина

Как результат, Tetric N-Bond Universal достигает высоких значений силы адгезии как на влажном, так и на сухом дентине.

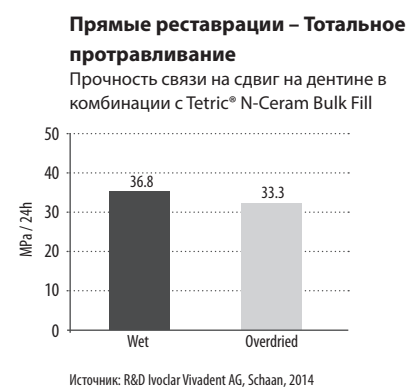

Универсальные условия хранения

Tetric N-Bond Universal содержит низкую концентрацию кислотных мономеров, обеспечивающих мягкий протравливающий эффект. Этот комплекс мономеров устойчив к гидролитическому распаду, что позволяет Tetric N-Bond Universal храниться при комнатной температуре.




Простота применения, всего 35 секунд



Нанесите слой адгезива и втирайте в течение 20 секунд
R&D, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2013



Раздуйте адгезив при помощи сжатого воздуха до появления блестящей пленки

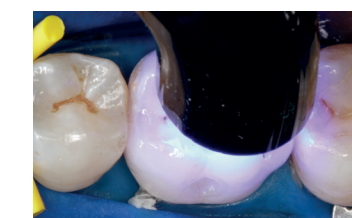

Проведите полимеризацию светом в течение 10 секунд (например, при помощи полимеризационной лампы Bluephase N®).

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФОРМА ПОСТАВКИ

Tetric N-Bond Universal выпускается во флаконах, а также в эргономичных ручках VivaPen. Ручка VivaPen делает применение адгезива непосредственно в полости рта пациента легким и удобным.



Активация нажатием кнопки на ручке VivaPen смачивает браш-канюлю точным количеством адгезива, необходимым для одного применения


Индикатор наполненности - для визуального контроля оставшегося количества адгезива

Браш-канюля для аккуратного и точного нанесения адгезива

Точность применения одним щелчком Click & Bond®

Простой кнопочный механизм дозирования адгезива позволяет стоматологу контролировать и экономно расходовать материал при каждой адгезивной процедуре. Так как этап нанесения адгезива на палетку отсутствует, достигается значительная экономия материала.

2 мл адгезива, содержащихся в ручке VivaPen, хватает приблизительно на 190 реставраций одиночных зубов. По сравнению с традиционной формой поставки во флаконах ручка позволяет сделать как минимум в три раза больше аппликаций на 1 мл. адгезива.

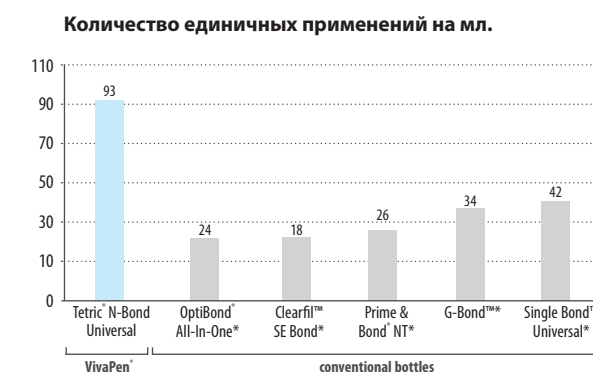

Информация для заказа

668222AN Refill VivaPen 1 x 2 мл
674175AN Refill VivaPen 1 x 2 мл / 40
668223AN Starter Kit VivaPen 1 x 0,5 мл
627178 Refill VivaPen браш-канюли (100 шт.)

627492 Refill VivaPen защитные чехлы (300 шт.)
668221 AN Refill флакон 1 x 6 г.
603949 Refill Vivadent аппликаторы