



Прямая реставрация

Tetric® N-Collection составляет часть категории продуктов «Прямая реставрация». Продукты этой категории предназначены для прямой реставрации зубов - от препарирования до ухода за полостью рта после реставрации. Продукты оптимально скоординированы друг с другом и позволяют успешно проводить подготовку и нанесение.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ:

OptraGate®

Безлатексный ретрактор губ и щек



Простое решение для лучшего обзора

- Значительно увеличен доступ к рабочему полю
- Пациент чувствует себя более комфортно благодаря трехмерной гибкости
- Широкий диапазон показаний

Fluor Protector N

Защитный фторсодержащий лак



Отличная профилактика кариеса и эрозии

- Эффективный — мгновенное фторирование эмали
- Оперативный - готов к немедленному использованию
- Высокопродуктивный - экономный расход

Вы хотите больше узнать о продуктах категории «Прямая реставрация»? Это просто. Свяжитесь с Вашим представителем Ivoclar Vivadent или посетите сайт www.ivoclarvivadent.com.

ООО «Ивоклар Вивадент»
Россия, Москва, 115432 Проспект
Андропова 18, корп. 6, офис 10-06
Тел.: +7 (499) 418-03-00
Факс: +7 (499) 418-03-10
info.ru@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.ru

**ivoclar
vivadent®**
passion vision innovation

Tetric® N-Collection

Полная нано-оптимизированная реставрационная система



Откройте для себя нашу
новейшую **КОЛЛЕКЦИЮ**

Tetric® N-Collection

Tetric® N-Ceram | Tetric® N-Ceram Bulk Fill | Tetric® N-Flow | N-Etch | Tetric® N-Bond | Tetric® N-Bond Self-Etch

**ivoclar
vivadent®**
passion vision innovation

Коллекция идеально скоординированных продуктов

Композитные пломбировочные материалы, подходящие практически для любых случаев прямых реставраций. Адгезивы, которые легко использовать, обеспечивающие превосходную прочность сцепления. Вот что выгодно отличает нано-оптимизированные продукты линейки Tetric® N-Collection. Эти материалы демонстрируют отличные клинические характеристики при реставрации зубов, начиная с 2007 года. Независимо от того, восстанавливаются ли передние или боковые зубы, в линии прекрасно скоординированных друг с другом продуктов, Tetric N-Collection, есть решение для полостей любого размера.

Пользователи не просто получают преимущества от использования продукции, которая проверена годами клинического применения. Они обретают новейшую технологию и больше возможностей для маневра в своей повседневной практике.



Tetric® N-Ceram Bulk Fill


4 ММ ДЛЯ УСПЕХА

Ранее приходилось поэтапно накладывать несколько 2-мм слоев до тех пор, пока полость не будет заполнена. Это довольно трудоемкая работа. Новый композит для реставрации зубов боковой группы Tetric N-Ceram Bulk Fill обеспечивает более быстрое заполнение полостей слоями толщиной до 4 мм. Однородная консистенция в значительной мере облегчает задачу придания материалу нужной формы.

Хорошо продуманная концепция

Благодаря запатентованному фотоинициатору Ivocerin® даже слой более 4 мм может полимеризоваться за 10 секунд (при 1000 мВт/см²). Ivocerin - усилитель полимеризации, включенный в стандартную фотоиницирующую систему Tetric N-Ceram Bulk Fill.


По сравнению с камфорохином и оксидом ацилфосфина (например, Lucirin TPO), химически он гораздо более активен при воздействии фотополимеризационной лампы.

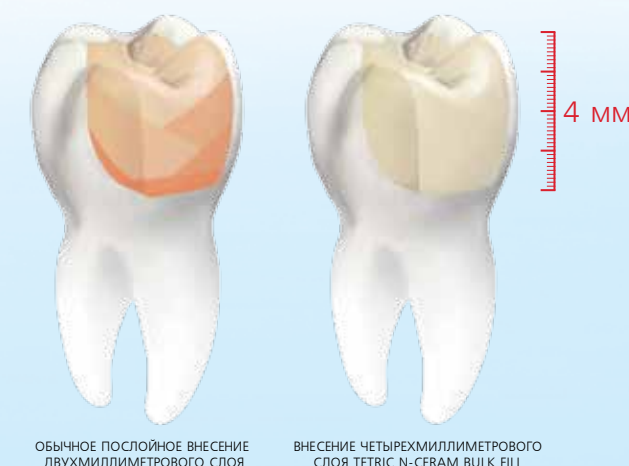

ОБЫЧНОЕ ПОСЛОЙНОЕ ВНЕШЕНИЕ ДВУХМИЛЛИМЕТРОВОГО СЛОЯ

ВНЕШЕНИЕ ЧЕТЫРЕХМИЛЛИМЕТРОВОГО СЛОЯ TETRIC N-CERAM BULK FILL

Несмотря на короткое время полимеризации, допускает продолжительность работы с Tetric N-Ceram Bulk Fill до 200 секунд. Такое полезное качество обеспечивает входящий в состав фильтр светочувствительности. Это позволяет выполнять эстетическую обработку без спешки. Особый компонент для снижения усадочного напряжения минимизирует усадку в процессе полимеризации. Он действует, как пружина, подавляя напряжение, вызванное усадкой.

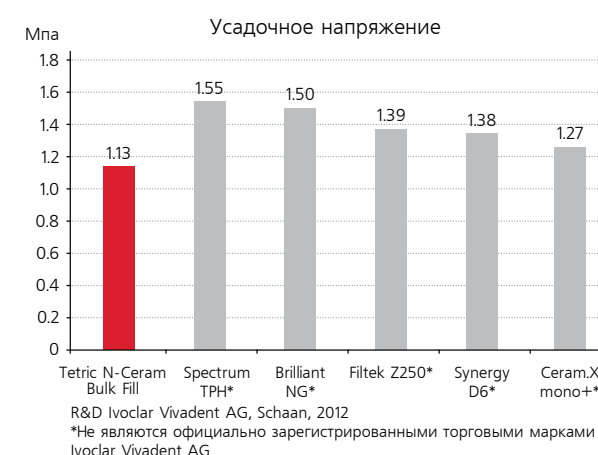

Др. Эдуардо Ман, Сантьяго, Чили

Tetric® N-Ceram

ЛЕГКИЙ ПУТЬ К ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РЕЗУЛЬТАТУ

Tetric N-Ceram — композитный материал светового отверждения для прямых реставрационных процедур во фронтальном и жевательных отделах. Благодаря применению нано-оптимизированной технологии Tetric N-Ceram не сваливается, что делает материал удобным для моделирования. Входящий в состав фильтр светочувствительности гарантирует возможность достаточно длительной обработки, несмотря на короткое время полимеризации - всего 10 секунд (≥ 1000 мВт/см²). Еще одно преимущество Tetric N-Ceram - материал не прилипает к инструментам.

Совместимость с натуральными оттенками

Нано-цветовые пигменты способствуют оптимальной адаптации цвета материала к цвету живых зубов. Они тонко распределены в структуре композитного материала и обеспечивают встраивание реставрации в окружающие ее структуры зуба. В результате, становится возможным создание реставраций, удовлетворяющих постоянно растущим эстетическим требованиям.


Превосходная рентгеноконтрастность

Хорошая рентгеноконтрастность материала — необходимое условие точной диагностики вторичного кариеса. Высокую рентгеноконтрастность Tetric N-Ceram ($> 400\%$ Al) обеспечивает добавление фторида иттербия. Что позволяет отличить реставрационный материал от структуры настоящего зуба и делает возможным долгосрочный успех лечения.



Др. Э. Ман, Чили, 2011 г.

Рентгеноконтрастность
% Al

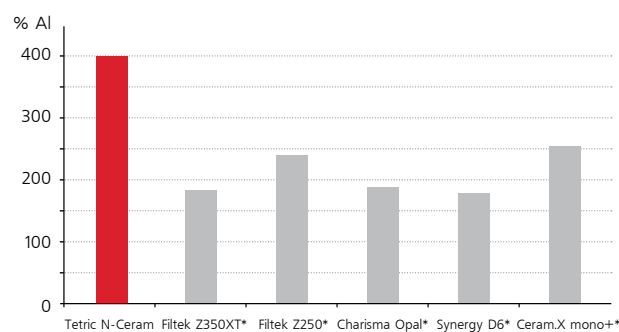

R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2013

*Не являются официально зарегистрированными торговыми марками Ivoclar Vivadent AG

Tetric® N-Flow

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЖИДКОТЕКУЧИЙ КОМПОЗИТ

Текущие композиты это материалы, без которых невозможно представить себе современную терапевтическую стоматологию. Они применяются, когда необходимо достичь структурного сходства поверхностей. В этом случае Tetric N-Flow может оказаться очень полезным.

Оптимальная вязкость Tetric N-Flow в сочетании с превосходными характеристиками текучести делает продукт подходящим для применения в качестве прокладочного материала. Кроме того, он может применяться в реставрациях класса V - благодаря стабильной консистенции, не позволяющей материалу растекаться. Это качество обеспечивает регулятор вязкости. Он же отвечает за вязкость композита во время сжатия.



Прокладочный слой в сочетании с композитным материалом нормальной вязкости, таким как Tetric N-Ceram/Tetric N-Ceram Bulk Fill в реставрациях I - V классов



Расширенное запечатывание фиссур



Небольшие пломбы любых видов (классы III и V)

Tetric N-Flow идеально совместим с другими светоотверждаемыми реставрационными композитными материалами, например, с Tetric N-Ceram и Tetric N-Ceram Bulk Fill. Великолепная увлажняющая способность обеспечивает удобство применения материала во всех областях полости.



Др. А. Пешке, Шаан, 2012 г.

Tetric® N-Bond Tetric® N-Bond Self-Etch

ВСЕГДА НАДЕЖНАЯ АДГЕЗИЯ


Независимо от используемой техники: тотального травления или самопротравливания, светоотверждаемые однокомпонентные адгезивы Tetric N-Collection устанавливают прочную связь между твердыми тканями зуба и реставрацией. Не содержащая ацетона формула продуктов предотвращает преждевременное испарение раствора в процессе внесения адгезива. Благодаря длительной стабильности консистенции обеспечивается надежное проникновение в ткань зуба. Кроме того, блестящий слой, который формируется на поверхности в процессе нанесения, делает возможной точную визуальную оценку.

КРАТКО О ПРЕИМУЩЕСТВАХ:

- Экономия времени: один шаг - один слой
- Устанавливает стабильную связь между эмалью и дентином
- Неизменно высокое качество и прочная связь

Убедительная сила адгезии

Самая большая область подготовленной поверхности зуба обычно состоит из дентина. Поэтому высокие показатели сцепления являются синонимом полноценной адгезии. В то же время хорошая адгезия эмали обязательна для достижения надежного краевого прилегания

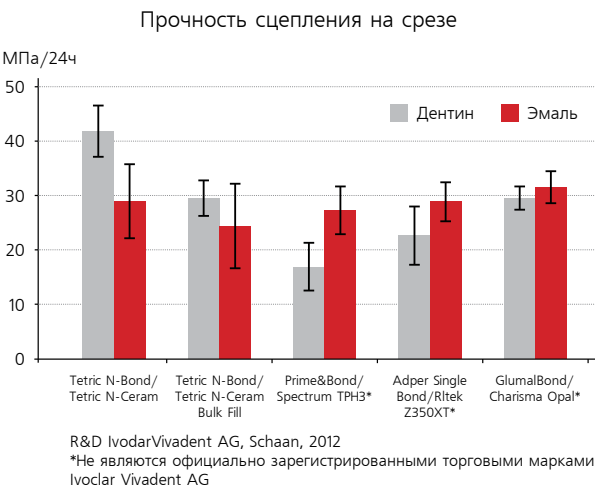

Др. А. Баез, Чили, 2011 г.



Др. С. Хернандес, Мексика, 2011 г.

Tetric® N-Collection

ПОЛНАЯ НАНО-ОПТИМИЗИРОВАННАЯ РЕСТАВРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Tetric N-Ceram Bulk Fill	Tetric N-Ceram	Tetric N-Flow	N-Etch
Refill в шприцах 1 x 3,5 г. Refill в шприцах 2 x 3,5 г. Refill в кавифилах 10 x 0,25 г. Доступны в следующих цветах: IVA- цвет Universal A IVB — цвет Universal B IVW - белый оттенок для молочных зубов или светлых постоянных зубов	Refill в шприцах 1 x 3,5 г. доступны в следующих цветах: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, C3, D3, A3.5 Dentin, B2 Dentin, T, Bleach L, Bleach I, Bleach M Refill в кавифилах 10 x 0,25 г. доступны в следующих цветах: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, C3, D3, A3.5 Dentin, B2 Dentin, T, Bleach L, Bleach I, Bleach M Набор System Kit с Tetric N-Bond 4 x 3,5 г. Tetric N-Ceram Bulk Fill (2 x IVA, 1 x IVB, 1 x IVW) 1 x 6 г. Tetric N-Bond 1 x 2 г. N-Etch 1 расцветка Различные аксессуары Набор System Kit с Tetric N-Bond Self-Etch 4 x 3,5 г. Tetric N-Ceram Bulk Fill (2 x IVA, 1 x IVB, 1 x IVW) 1 x 6 г. Tetric N-Bond Self-Etch 1 расцветка Различные аксессуары	Refill в шприцах 1 x 2 г. доступны в следующих цветах: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, A3.5 Dentin, T, Bleach L, Bleach I Refill в кавифилах 10 x 0,25 г. доступны в следующих цветах: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, A3.5 Dentin, T, Bleach L, Bleach I Assortment Pack 8 x 2 г. в шприцах 1 x A1, 4 x A2, 2 x A3, 1 x A3.5 1 расцветка Различные аксессуары Аксессуары 20 x аппликационных насадок	Refill 2 x 2 г. N-Etch в шприцах 10 x аппликационных насадок Аксессуары 20 x аппликационных насадок
Tetric N-Bond Self-Etch			
Refill бутылочка 1 x 6 г. бутылочка			
Refill VivaPen 1 x 2 мл. ручка VivaPen 20 x кисточек-канюль VivaPen			
Аксессуары 50 x белых аппликаторов Vivadent 100 x кисточек-канюль VivaPen 500 x рукавов VivaPen			
Tetric N-Bond			
Refill бутылочка 1 x 6 г. бутылочка			
Refill VivaPen 1 x 2 мл. ручка VivaPen 20 x кисточек-канюль VivaPen			
Аксессуары 50 x белых аппликаторов Vivadent 100 x кисточек-канюль VivaPen 500 x рукавов VivaPen			

