



Инструкция по использованию

ТHERMOFIX[®].

(арт. 455001, арт. 455002)

1. Поместить ThermoFix[®] в горячую воду 60°C (155° F-180° F).
2. Через одну минуту, гранулы станут прозрачными, соединятся, затем извлечь при помощи металлической, пластиковой ложки или шпателя. ThermoFix[®] не липкий и не горячий, его можно держать в руках.
3. Вы можете придать тёплому материалу любую нужную Вам форму. ThermoFix[®] не будет прилипать к сухой поверхности.
4. Если для придания формы используется модель, рекомендуется обработать поверхность лаком Isosep Film[®] (арт. 55503). Для ускорения затвердевания поместить в холодную воду.
5. Работа с материалом: Можно работать как с воском.
Корректировать форму можно при нагревании.

По всем интересующим Вас вопросам
обращайтесь в компанию ООО «Перфлекс Рус»
г. Санкт-Петербург: (812) 244-40-58,
e-mail: office@perflexrussia.ru;
г. Москва: (495) 780-60-80,
e-mail: office@medo.company;
8-800-500-36-60 (звонок по РФ бесплатный).