

World Standard Ceramics

ZEOQUICK - продукт, созданный на основе потребности в трехшаговом нанесении O-D-E(Опак-Дентин-Эмаль)



Продукция ZEOQUICK основывалась на требованиях зубных техников в точности передачи цвета при простом нанесении материала. Благодаря точности подбора цвета Эмали, исключая этап нанесения Транспорента, продукт ZEOQUICK стал универсальной керамической массой, предоставляя техникам легкость в исполнении работ.

Керамика ZEOQUICK унаследовала такие физические свойства массы ZEO CE LIGHT, как прочность на изгиб, коэффициент теплового расширения и температура обжига.

Это позволяет использовать модификаторы и красители ZEO CE LIGHT с ZEOQUICK для получения отличного эстетического результата.

Физические свойства подобны ZEO CE LIGHT


- Прочность на изгиб
- Программа Обжига
- Твёрдость по Виккерсу
- Коэффициент Теплового Расширения
- Высокая Адгезия



Простое нанесение за короткий срок



Использование Металлокерамических реставраций является одним из самых известных способов в воспроизведении естественного эстетического вида натуральных зубов. В то же время это сложная работа и требует больших затрат времени со стороны зубных техников. Не смотря на то, что многие техники стараются облегчить процедуры для сохранения времени, они должны следовать инструкции производителя, чтобы предотвратить возникновение механических повреждений на заключительном этапе. С уменьшением количества шагов нанесения массы возможно сокращение времени при отличных эстетических результатах. ZEOQUICK - продукт, созданный на основе потребности в трехшаговом нанесении O-D-E(Опак-Дентин-Эмаль)

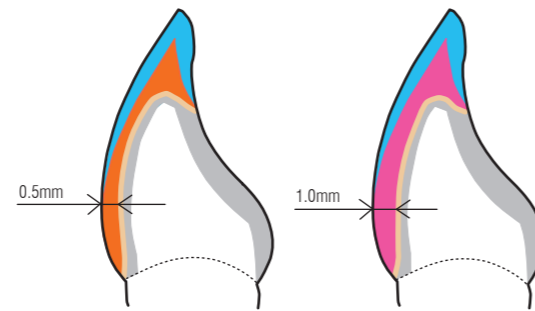

- ENAMEL
- DENTINE 0.5 or 1.0
- OPAQUE

В зависимости от толщины слоя используется два типа Дентина 0,5 и 1,0. Дентин 0,5 используется при достаточно тонком слое наносимого дентина.

Надёжность в работе



Керамика ZEOQUICK унаследовала такие выдающиеся физические характеристики материала керамической массы ZEO CE LIGHT, как технология контролируемого роста лейцитных кристаллов, а именно устойчивость к сколам, высокая прочность на изгиб, прозрачность. Кроме того, уничтожение загрязнений, путем отбора безопасных промышленных материалов, обеспечивает биосовместимость материала с организмом.




Стабильность KTP
Период стабильного действия более 20 часов

Простота подбора оттенка



Зубных техников интересует точное соответствие цвета зуба пациента и металлокерамических реставраций. Керамика ZEOQUICK обладает идеальными характеристиками подбора оттенка и 100% попаданием в шкалу VITA. Для проверки оттенка в специальных условиях используется свет лампы накаливания, флуоресцентные лампы или естественный солнечный свет.

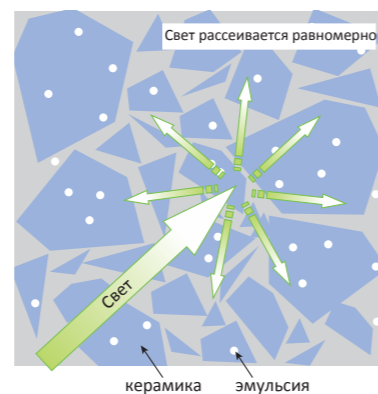


Опалесценция

Керамическая масса смешивается даже в сухом и твердом виде, используя палитру для перемешивания

Передовые технологии



В керамике ZEOQUICK используются только базовые порошки (OPAQUE + DENTINE + ENAMEL) для более простого нанесения. Однако, для передачи эстетики материала используются многие натуральные оттенки. Модификатор Accent и краситель Stain ZEO CE LIGHT применяются в комбинации с ZEOQUICK.

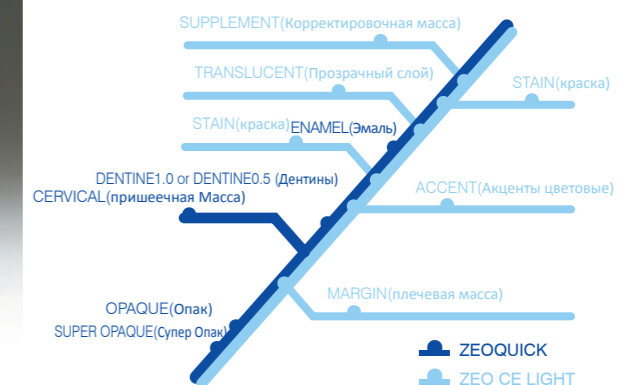

ZEOQUICK может использоваться в сочетании со специальными керамическими массами ZEO CE LIGHT, такими как модификатор Accent и краситель Stain для получения отличных эстетических результатов

Цветовая шкала ZEOQUICK

		A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Супер Опак SUPEROPAQUE	7г паста																
Опак OPAQUE	7г паста																
Пришеечная масса CERVICAL	20, 50, 200г порошок	C-1	C-2	C-3	C-1	C-3	C-4	C-5	C-4	C-5							
Дентин DENTINE-0.5	20, 50, 200г порошок																
Дентин DENTINE-1.0	20, 50, 200г порошок																
Эмаль ENAMEL	20, 50, 200г порошок	E-2	E-3	E-4	E-2	E-4	E-3	E-4	E-3	E-4							



Стремиться позиционировать себя надежным брендом-производителем стоматологического материала

Yamamoto стремится обеспечить клиентов безопасным, надежным, высококачественным продуктом, удовлетворяющим высокие потребности. Для выполнения данного обязательства, Yamamoto установили строгие критерии:

Система Менеджмента Качества в соответствии со Стандартом ISO

Деятельность Yamamoto была проверена и одобрена третьими лицами TÜV SÜD, Германия, с целью получения сертификатов ISO 9001 и ISO 13485 (Система Менеджмента Качества Медицинских Устройств). Мы внедрили передовые системы контроля качества высокого уровня как производитель Управляемых Медицинских Устройств



Программа Обжига (ZEO CE LIGHT & ZEOQUICK)

позиция/режим	Сушка (мин.)	Стартовая температура (°C)	Скорость подъёма (°C/мин.)	Температура обжига (°C)	Время выдержки (мин.)	Уровень вакуума (кПа)<cmHg>
Опак *1	5-10	450-500	60	920	1	97<73>
Плечевая масса *2	6-9	550-600		900		
Дентин *3						
Дополнительные обжиги	4			880		Атмосферный
Глазурь				790-830*4		97<73>
Коррекционная масса				820		
Краска(внутр.)				880		Атмосферный
Краска(наружн.)	4					

*1 Супер Опак, Опак
 *2 Плечевая Масса
 *3 Оpaque Dentine, Dentine, Enamel, Opal Enamel, Translucent, Accent, Gum
 *4 Обжигайте при более низкой температуре, если глянец нежелателен. Обжигайте при более высокой температуре, если необходимо добиться глянцевой поверхности.
Примечание В зависимости от условий обжига могут отсутствовать изначальные показатели. Пожалуйста, воспользуйтесь нижеприведенной информацией.
 Условия обжига могут отличаться в зависимости от типов и формы печей. Отрегулируйте температурный режим в диапазоне ± 20 ° C.
 Для Оpaque- слегка глянцевая поверхность, для Dentine - легкий блеск.

Мониторинг Событий Информационной Безопасности

Информационная безопасность с момента производства продукта до пост-маркетингового контроля информационной безопасностью: для получения объективных результатов оценки качества, был создан независимый мониторинг системы продаж под руководством генерального директора департамента маркетинга. Ответственным за обеспечение качества системы был назначен менеджер, отвечающий за надлежащее исполнение качества на практике; ответственным за Контроль безопасности назначен руководитель управления безопасностью. Информация, поступающая из клинической практики, отслеживается компанией Yamamoto



YAMAMOTO Yamamoto Precious Metal Co., Ltd.
 Head Office: 3-7 Sanadayama-cho Tennoji-ku Osaka 543-0015, Japan
 Branch Office: Tokyo, Osaka, Sendai, Nagoya, Fukuoka, JAPAN
 Factory and R&D: Kochi, JAPAN
 P: +81-6-6761-8338 F: +81-6-6761-0610
 E: contact@yamakin-gold.co.jp
<http://www.yamakin-gold.co.jp>

ISO 9001/13485
 ISO 14001
 CERTIFIED



CE 0123

INTERNATIONAL20120310